



Amnicator[®]

Tes Visual Cepat
untuk Deteksi
Cairan Ketuban



Solusi praktis dan andal untuk membantu tenaga medis mendeteksi kebocoran cairan ketuban secara cepat dan akurat.



Deteksi Dini, Keputusan Lebih Cepat

- Mudah digunakan
- Memberikan hasil cepat
- Membantu deteksi dini cairan ketuban
- Mendukung pengambilan keputusan klinis lebih awal

Keunggulan Produk

- ✓ Hasil cepat dan mudah dibaca secara visual
- ✓ Prosedur non-invasif
- ✓ Aman dan nyaman bagi ibu
- ✓ Tidak menimbulkan risiko tambahan
- ✓ Praktis digunakan di fasilitas kesehatan




Amnicator®



Cara Penggunaan

1

Dalam posisi medis, baringkan pasien, bersihkan area vagina, dan buka dengan spekulum bivalve untuk melihat leher rahim.

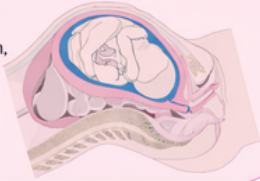


2

Keluarkan swab Amnicator® dari kemasan. Hindari menyentuh ujungnya atau terkena zat lain.



3

Masukkan swab Amnicator® ke dalam vagina, usap cairan selama 15 detik pada area serviks atau forniks posterior vagina.

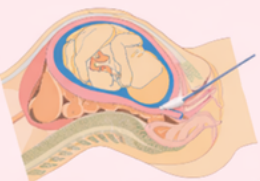

4

Keluarkan swab Amnicator® dan periksa warna ujung swab setelah 5 detik, lalu cocokkan warnanya dengan tabel di bawah ini.

Membran Utuh

pH 5.0 Kuning



pH 5.5 Kuning/Oliv



pH 6.0 Hijau/Oliv



Membran Pecah

pH 6.5 Hitam/Hijau Tua



pH 7.0 Biru/Hitam



pH 7.5 Biru



Manfaat Penggunaan

- Membantu identifikasi dini kebocoran cairan ketuban
- Mendukung diagnosis klinis secara cepat
- Mengurangi keterlambatan penanganan medis
- Praktis untuk penggunaan rutin di fasilitas kesehatan

Penyimpanan Produk

- ✓ Dapat disimpan pada suhu ruang
- ✓ Masa simpan hingga 2 tahun
- ✓ Tidak memerlukan penyimpanan khusus

INFORMASI PEMESANAN

KODE	DESKRIPSI	JUMLAH
MWAM5	Amnicator® swab indikator cairan ketuban	50

Catatan: Terapi antibiotik atau adanya infeksi vagina dapat memengaruhi pH normal vagina sehingga berpotensi menyebabkan hasil positif palsu.